



Pulizia

lavare con acqua tiepida (max. 30°),
detergente neutro e disinfettare con
disinfettanti compatibili con i materiali di
costruzione (PEHT).

Disinfezione

Lasciare l'Easy Lift per un'ora in acqua
(max. 20°) con disinfettante, quindi
risciacquare con acqua potabile.

Easy Lift

Sospendita per sollevamento 65exl

(con sollevatori per il trasferimento di persone disabili a
norma UNI EN ISO 10535)

La sospendita Easy Lift consente di sollevare in modo
semplice e sicuro i pazienti utilizzando la barella
scoop per brevi tratti utili al trasferimento del paziente
da una barella al letto o ad una diagnostica.



Facilissima da applicare e da rimuovere non richiede
particolari abilità e può essere utilizzata con tutte le
65exl.

Misure e caratteristiche

Lunghezza: 1250 mm / 1150 mm
Larghezza: 15 mm
Peso 2.3 kg
Carico massimo 227 Kg
Carico di rottura per fettuccia 22 KN

Materiale impiegati

Fettuccia PE HT

Caratteristiche

2 fettucce in fibra PE HT lunghe (1250 mm)
2 fettucce in fibra PE HT corte (1150 mm)

Prove statiche conformi UNI EN ISO 10535

Il sistema Easy Lift è stato testato in laboratorio con le
prove statiche previste per determinare il carico
massimo di ogni ramo di sospendita, la tenacità dei
materiali e delle cuciture di assemblaggio.

Il sistema Easy Lift è stato testato in abbinamento
alla barella FERNO 65exl ed a barre distanziatrici dei
sollevatori:

- Guldmann GH Barra di presa (2016)
- BHM Medical Inc for ARJO mod. Maxisky 440

Conforme ai requisiti

93/42/CEE (Dispositivi Medici in classe I)
EN ISO 10535 (dec-2006)



Cod. **PS0765EXL**